


LEGIO.medizinfilter

Steriler Handbrausefilter (PZN 07138339)

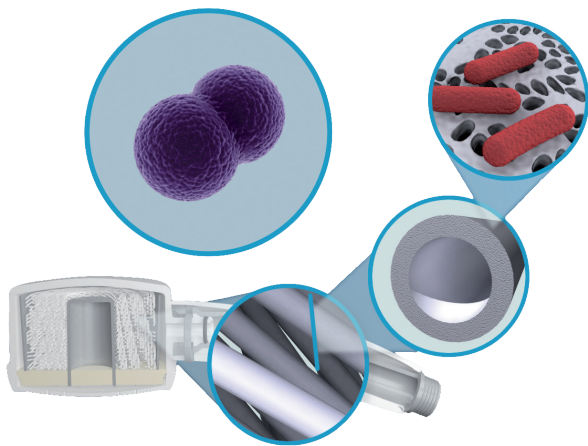

Der sterile LEGIO.medizinfilter ist ein zugelassenes Medizinprodukt zum Duschen und Waschen des Körpers mit steril filtriertem Wasser. Eines der Hauptrisiken für bakterielle Infektionen ist mikrobiologisch kontaminiertes Dusch- und Leitungswasser. Der LEGIO.medizinfilter ist mit einer kapillaren Mikrofiltrationsmembran mit 0,2 Mikron ausgestattet, die während dem Nutzungszeitraum von bis zu 70 Tagen alle Wasserkeime* sowie Schmutzpartikel zurückhält und so einen zuverlässigen Schutz bietet. Zusätzlich ist der Kunststoffbrauseboden mit Silberionen versetzt und wirkt damit einer Reverkeimung entgegen.

Anwendungsbereiche

- Steril filtriertes Wasser zum Abduschen der Haut bzw. des Körpers
 - Zur Körperpflege
 - Zur Wundbehandlung
 - Für immungeschwächte Menschen
 - Zum Schutz vor Infektionen durch Wasserkeime über die Haut oder die Lunge
- Bitte beachten Sie stets die Empfehlungen Ihres behandelnden Arztes zur Wundbehandlung.

Vorteile der LEGIO.medizinfilter

- Rückhaltevermögen:* >LOG 7 für Bakterien = 99,99999%, >LOG 4 für Pilze = 99,99%
- Schützt vor im Wasser enthaltenen Bakterien wie z.B. Legionellen und Pseudomonaden sowie Pilzen
- CE geprüftes Medizinprodukt der Klasse Is mit Prüfsiegel
- Validation/Zertifizierung durch renommiertes westeuropäisches Labor VITENS
- Individuell temperier- und dosierbar
- Farb-, reiz- und geruchlos
- Verringertes Schmerzempfinden durch Handhabung ohne hautreizende Zusätze
- Lange Nutzungsdauer bis zu 70 Tage
- Einwegsystem mit Entsorgung im Restmüll
- Handliches, modernes Design

Handhabung des LEGIO.medizinfilters

Der sterile Brausefilter wird an Ihren vorhandenen, unversehrten Duschschauch der Badewanne oder Dusche angeschlossen. Dafür dreht man die herkömmliche Handbrause aus dem Gewinde des Duschschauches heraus und den LEGIO.medizinfilter auf das Duschschauchgewinde bis zum Anschlag fest hinein. Achten Sie darauf, dass Ihr vorhandener Dichtungsring am Brauseschlauch für absolute Dichtigkeit sorgt. Vor und nach jedem Gebrauch muss der Medizinfilter mit einer Wischdesinfektion abgerieben werden um eventuelle Reverkeimungen zu vermeiden. Schützen Sie den LEGIO.medizinfilter unbedingt vor jeglichen Erschütterungen und Schlägen. Der gesamte Handbrausefilter darf nicht geöffnet oder verändert werden. Der LEGIO.medizinfilter darf zur Aufbewahrung keinesfalls auf den Boden, in die Wanne oder in ein Gefäß gelegt werden. Er ist ausschließlich in einer dafür vorgesehenen Wandhalterung freistehend aufzubewahren. Bitte bringen Sie stets den beigefügten Datumsaufkleber auf dem Duschkopf an.


Reines Wasser, sonst nichts

LEGIO

LEGIO.medizinfilter

Steriler Handbrausefilter (PZN 07138339)

Technische Daten


Modellnummer	MSF-HCSS / 31.2.102
	
Modellname	LEGIO.medizinfilter
PZN	07138339
Max. Maße	225 x 88 mm
Gewicht	240 gr.
Verbindung	1/2 Zoll BSP (Standardschlauch)
Volumenstrom bei 2 bar	6 l/min bei Stadtwasser ⁽¹⁾
Bestätigte Lebensdauer	70 Tage
Rückhaltung von Bakterien- und Pilzen	Bakterien >LOG 7 Pilze >LOG 4

⁽¹⁾ Durchflussbegrenzer empfohlen

Materialien und technische Daten

Filtermaterial	Kapillare Mikrofiltrationsmembranen
Mikrongröße	0,2 µ
Kunststoff-Brauseboden	Antimikrobieller Zusatz zur Verringerung von Reverkeimung
Max. Betriebsdruck	5 bar
Betriebstemperatur	0 - 60 °C; 70 °C für 30 min bei 2 bar während Lebensdauer
Chloraufnahme	1.200 ppm, insgesamt 10 Stunden während Lebensdauer
Lagerung & Handhabung	<ul style="list-style-type: none">Validierte Haltbarkeit 2 JahreTrocken lagern; nach erstem Gebrauch vor Frost schützenMit Vorsicht behandeln, keinen starken Erschütterungen aussetzenKann nach Gebrauch dem Restmüll beigefügt werdenSteriles Produkt und sterile Verpackung bis zur Beschädigung oder Öffnung der TüteNach Öffnung und Installation des LEGIO.medizinfilters ist dieser maximal 70 Tage (unabhängig von der Häufigkeit der Nutzung) bis zum Austausch bzw. zur Entsorgung verwendbarVor und nach jedem Gebrauch einer Wischdesinfektion (max. 60 %, bzw. 0,05 mg/g Anteil Ethanol) unterziehen

Steriler Handbrausefilter

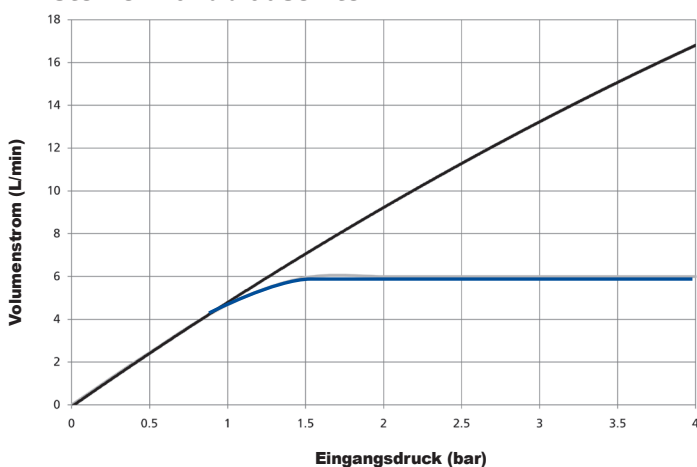

Produkt-Zertifizierung

Jeder LEGIO.medizinfilter der Serie steril antibakteriell entspricht den Anforderungen des Medizinprodukte-Gesetzes 93/42/EEC, Anhang VII und ist als Klasse Is, Norm I -Produkt registriert.

0344
CE

Haftungsausschluss:

Die in diesem Dokument angegebenen Informationen und Daten basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und werden als korrekt angesehen. Sie werden nach bestem Wissen angegeben und sollen eine Richtlinie für die Auswahl und Verwendung unserer Produkte bieten. Da die Bedingungen, unter denen unsere Produkte möglicherweise verwendet werden, außerhalb unserer Kontrolle liegen, bilden diese Informationen keine Garantie für die endgültige Leistung des Produktes und wir übernehmen keine Haftung hinsichtlich der Verwendung unserer Produkte. Die Qualität unserer Produkte ist gemäß unserer Verkaufsbedingungen gewährleistet. Bestehende (gewerbliche, intellektuelle oder andere) Schutzrechte müssen beachtet werden.

Dieses Produkt ist kein Heilmittel und ersetzt nicht die Behandlung und Beratung Ihres Arztes und/oder Apothekers.

LEGIO

Vertrieb durch: LEGIO.tools GmbH
Schlattgrabenstr. 10 • DE-72141 Walddorfhäslach • Deutschland
T +49 (0) 7127 1806-0 • F +49 (0) 7127 1806-222 • E info@legio.com
I www.legio.com • http://video.legio.com • http://facebook.legio.com

Member of

figawa

Member of

DVGW

MF Range LEGIO ST/HC DE 08-2014