


# LEGIO.medizinfilter

Steriler Handbrausefilter (PZN 07138339)

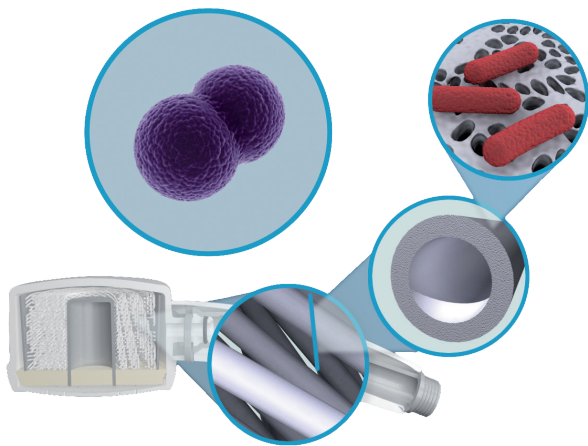

Der sterile LEGIO.medizinfilter ist ein zugelassenes Medizinprodukt zum Duschen und Waschen des Körpers mit steril filtriertem Wasser. Eines der Hauptrisiken für bakterielle Infektionen ist mikrobiologisch kontaminiertes Dusch- und Leitungswasser. Der LEGIO.medizinfilter ist mit einer kapillaren Mikrofiltrationsmembran (Porendurchmesser: 0,2 µm) ausgestattet, die während des Nutzungszeitraums von bis zu 70 Tagen gefährliche Wasserkeime sowie Schmutzpartikel zurückhält und so einen zuverlässigen Schutz bietet. Zusätzlich ist der Kunststoffbrauseboden mit Silberionen versetzt und wirkt damit einer Reverkeimung entgegen.

## Anwendungsbereiche

- Schutz vor Infektionen durch Wasserkeime über die Haut oder die Lunge
- Sicherer und zuverlässiger Schutz in Hochrisikobereichen
- Sicherer und zuverlässiger Schutz direkt vor dem Patientenkontakt
- Zur Wundbehandlung geeignet

## Vorteile der LEGIO.medizinfilter

- Schützt sicher vor im Wasser enthaltenen Bakterien wie Legionellen und Pseudomonaden
- CE Medical Class Is mit Prüfsiegel
- Für Hochrisikobereiche wie Intensivstationen, Operationsbereiche, onkologische Abteilungen u.a.m. geeignet
- Dauerhafte Keimabwehr
- Antimikrobielle Oberfläche des Düsenbodens
- Lange Nutzungsdauer: bis zu 35 Nutzungstage
- Handliches und modernes Design
- Einwegsystem mit Entsorgung im Restmüll

## Handhabung des LEGIO.medizinfilters


Der sterile Brausefilter wird an Ihren vorhandenen, unversehrten Duschschauch der Badewanne oder Dusche angeschlossen. Dafür dreht man die herkömmliche Handbrause aus dem Gewinde des Duschschauches heraus und den LEGIO.medizinfilter auf das Duschschauchgewinde bis zum Anschlag fest hinein. Achten Sie darauf, dass Ihr vorhandener Dichtungsring am Brauseschlauch für absolute Dichtigkeit sorgt. Vor und nach jedem Gebrauch muss der Medizinfilter mit einer Wischdesinfektion abgerieben werden um eventuelle Reverkeimungen zu vermeiden. Schützen Sie den LEGIO.medizinfilter unbedingt vor jeglichen Erschütterungen und Schlägen. Der gesamte Handbrausefilter darf nicht geöffnet oder verändert werden. Der LEGIO.medizinfilter darf zur Aufbewahrung keinesfalls auf den Boden, in die Wanne oder in ein Gefäß gelegt werden. Er ist ausschließlich in einer dafür vorgesehenen Wandhalterung freistehend aufzubewahren. Bitte bringen Sie stets den beigefügten Datumsaufkleber auf dem Duschkopf an.

Brausefilter



## Steriler Handbrausefilter (PZN 07138339)

### Technische Daten


<b>Modellnummer</b>	<b>MSF-HCSS / 31.2.102</b>
	
<b>Modellname</b>	LEGIO.medizinfilter
<b>PZN</b>	07138339
<b>Max. Maße</b>	225 x 88 mm
<b>Gewicht</b>	240 gr.
<b>Verbindung</b>	1/2 Zoll BSP (Standardschlauch)
<b>Volumenstrom bei 2 bar</b>	6 l/min bei Stadtwasser <sup>(1)</sup>
<b>Bestätigte Lebensdauer</b>	70 Tage
<b>Rückhaltung von Bakterien- und Pilzen</b>	Bakterien >LOG 7 Pilze >LOG 4

<sup>(1)</sup> Durchflussbegrenzer empfohlen

### Materialien und technische Daten

<b>Filtermaterial</b>	Mischung aus Polyethersulfon und Polyvinylpyrrolidon
<b>Porengröße</b>	0,2 µm
<b>Kunststoff-Brauseboden</b>	Antimikrobieller Zusatz zur Verringerung von Reverkeimung
<b>Max. Betriebsdruck</b>	5 bar
<b>Betriebstemperatur</b>	0 - 60 °C; 70 °C für 30 min bei 2 bar während Lebensdauer
<b>Chloraufnahme</b>	1.200 ppm, insgesamt 10 Stunden während Lebensdauer
<b>Lagerung &amp; Handhabung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Validierte Haltbarkeit 2 Jahre</li> <li>Trocken lagern; nach erstem Gebrauch vor Frost schützen</li> <li>Mit Vorsicht behandeln, keinen starken Erschütterungen aussetzen</li> <li>Steriles Produkt und sterile Verpackung bis zur Beschädigung oder Öffnung der Umverpackung</li> <li>Nach Öffnung und Installation des LEGIO.medizinfilters ist dieser maximal 70 Tage (unabhängig von der Häufigkeit der Nutzung) bis zum Austausch bzw. zur Entsorgung verwendbar</li> <li>Vor und nach jedem Gebrauch einer Wischdesinfektion (max. 60 %, bzw. 0,05 mg/g Anteil Ethanol) unterziehen</li> <li>Kann nach Gebrauch dem Restmüll beigefügt werden</li> </ul>

### Steriler Handbrausefilter

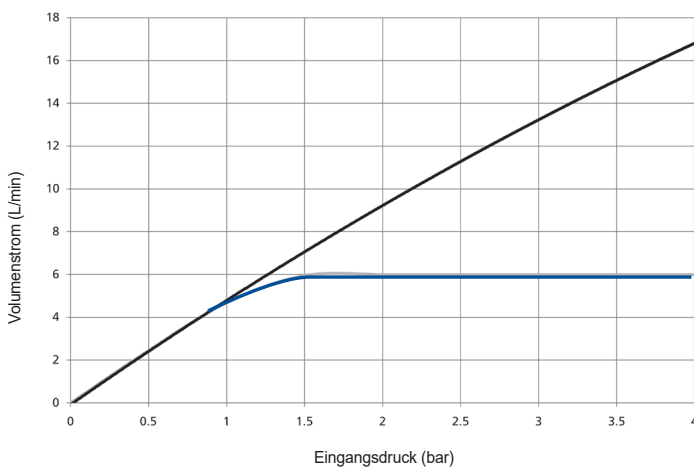

### Produkt-Zertifizierung

Jeder LEGIO.medizinfilter der Serie steril antibakteriell entspricht den Anforderungen des Medizinprodukte-Gesetzes 93/42/EEC, Anhang VII und ist als Klasse Is, Norm I -Produkt registriert.

0344  
CE

### Haftungsausschluss:

Die in diesem Dokument angegebenen Informationen und Daten basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und werden als korrekt angesehen. Sie werden nach bestem Wissen angegeben und sollen eine Richtlinie für die Auswahl und Verwendung unserer Produkte bieten. Da die Bedingungen, unter denen unsere Produkte möglicherweise verwendet werden, außerhalb unserer Kontrolle liegen, bilden diese Informationen keine Garantie für die endgültige Leistung des Produktes und wir übernehmen keine Haftung hinsichtlich der Verwendung unserer Produkte. Die Qualität unserer Produkte ist gemäß unserer Verkaufsbedingungen gewährleistet. Bestehende (gewerbliche, intellektuelle oder andere) Schutzrechte müssen beachtet werden.



Vertrieb durch LEGIO.tools GmbH  
Schlattgrabenstr. 10 • DE-72141 Walddorfhäslach • Deutschland  
T +49 (0) 7127 1806-0 • F +49 (0) 7127 1806-222  
E info@legio.com • www.legio.com

