


# LEGIO.medizinfilter

Installation - Kartuschenwechsel - Reinigung



## HANDBRAUSE: SERIE STERIL STANDARD + STERIL ANTIBAKTERIELL

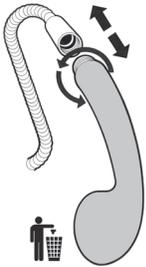


### Schritt 1:

Vorhandene Handbrause entfernen und entsorgen.




### Schritt 2:

LEGIO.medizinfilter Handbrause aus der Verpackung entnehmen.

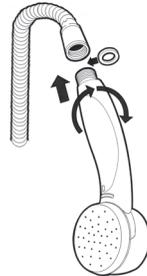


### Schritt 3:

Handbrause auf den Schlauchanschluss aufschrauben. Dichtung einlegen!

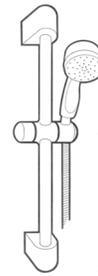


### Schritt 4:

Handbrause in Halterung einstecken. Handbrause darf nach Benutzung nicht auf dem Boden liegen oder am Schlauch hängen.

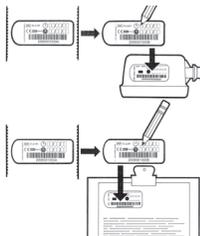

### Schritt 5:


Datum des Kartuschenwechsels auf Aufkleber schreiben. Aufkleber auf Kartusche anbringen.

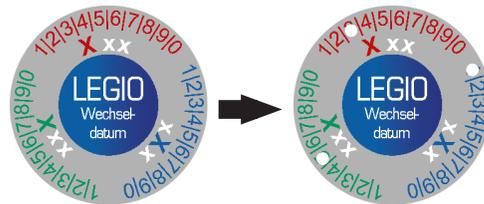

### Alternativ: Nutzen Sie den LEGIO-Datumsaufkleber.


Datumsaufkleber mit Jahrestag markieren und auf Kartusche aufkleben. **Siehe Kartuschenwechselkalender**

Zum Beispiel: Tag 245 + 70 = **3 1 5**

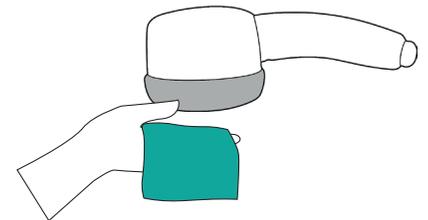

### Hinweis zur Reinigung:

Eine Reinigung des Filtergehäuses darf ausschließlich mit auf Alkohol oder Peroxid basierenden Flächendesinfektionsmitteln durchgeführt werden. Bitte nur den Filterboden wischen, nicht seitlich.

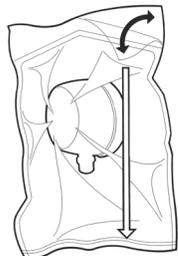


### Kartuschenwechsel:


Kartusche mit Werkzeug entriegeln. Kartusche abziehen und in Beutel verpacken. Achtung: Miniventil (5mm Gummiteil) ggf. entfernen.

Reines Wasser, sonst nichts

## WASCHTISCH/TRINKWASSER: SERIE STERIL STANDARD + STERIL ANTIBAKTERIELL

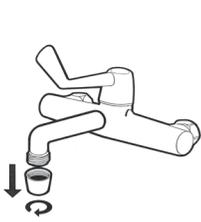

**Schritt 1:**  
Luftsprudler entfernen.

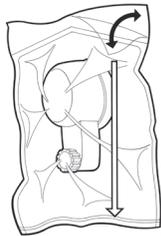


**Schritt 2:**  
LEGIO.medizinfilter der Verpackung entnehmen.




**Schritt 3:**  
Durchflussreduzierer montieren.  
4 l/min Standard  
6 l/min oder 8 l/min möglich.  
Ohne Durchflussreduzierer muss Sicherungsklammer (nicht abgebildet) verwendet werden.




**Schritt 4:**  
Ggf. Übergangsadapter\* (nicht abgebildet) in Anschlusswinkel einschrauben.  
Anschlusswinkel mit Übergangsadapter anschrauben.  
\*Zubehör

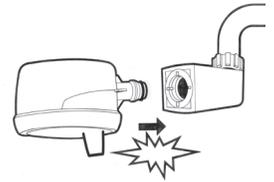


**Schritt 5:**  
Kartusche auf montierten Anschlussadapter aufstecken. Festen Sitz prüfen.

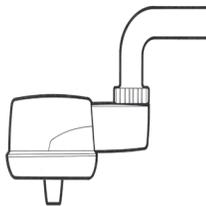


**Schritt 6:**  
Zur Entlüftung betätigen bis Wasserstrahl gleichmäßig fließt.

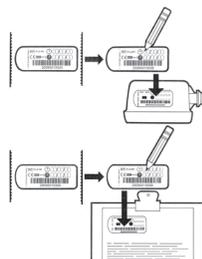


**Schritt 7:**  
Datum des Kartuschenwechsels auf Aufkleber schreiben. Aufkleber auf Kartusche anbringen.

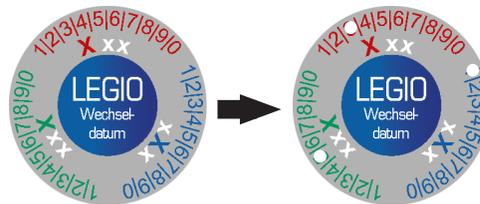

**Alternativ: Nutzen Sie den LEGIO-Datumsaufkleber.**  
Datumsaufkleber mit Jahrestag markieren und auf Kartusche aufkleben. **Siehe Kartuschenwechselkalender**  
**Zum Beispiel: Tag 245 + 70 = 3 1 5**

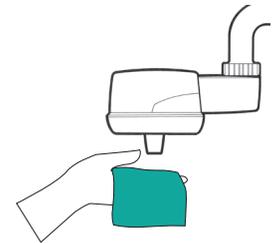

**Hinweis zur Reinigung:**  
Eine Reinigung des Filtergehäuses darf ausschließlich mit auf Alkohol oder Peroxid basierenden Flächendesinfektionsmitteln durchgeführt werden. Bitte nur den Filterboden wischen, nicht seitlich.

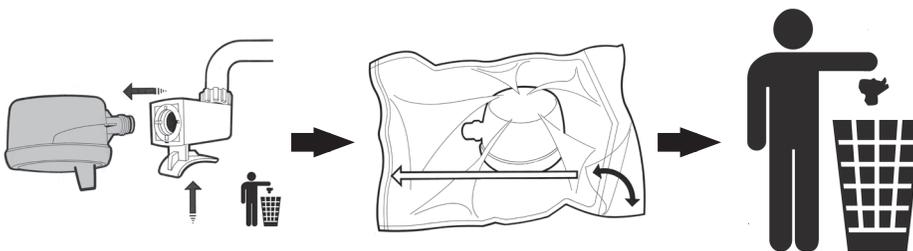

**Kartuschenwechsel:**  
Kartusche mit Werkzeug entriegeln. Kartusche abziehen und in Beutel verpacken. Achtung: Miniventil (5mm Gummitteil) ggf. entfernen.

**Hinweis:**  
Bitte beachten Sie für die Montage der Filter die Installationsanweisungen Ihrer bereits verbauten Armaturen (wie z.B. drucklose Speicher/Boiler usw.). Dies gilt für alle LEGIO Filterprodukte.

