



## LEGIO.pure – die ideale Lösung für Ihr Zuhause

Sie möchten jederzeit sauberes, frisches Trinkwasser direkt aus Ihrem Wasserhahn genießen? Mit dem **LEGIO.pure** erhalten Sie steril gefiltertes Wasser – und umgehen so zum Bsp. Abkochgebote oder Bedenken wegen kontaminiertem Leitungswasser. Dank hochwertiger Membran bleiben **gesunde Mineralstoffe** im Wasser erhalten, während krankmachende Mikroorganismen zuverlässig entfernt werden. Das Ergebnis: klarer, geschmacklich frischer und hautfreundlicher Wassergenuss für die ganze Familie.

Der LEGIO.pure eignet sich perfekt für **Waschtische in Bad, Küche oder Gäste-WC** und lässt sich einfach und schnell montieren, sodass Sie in wenigen Minuten von sauberem Trinkwasser profitieren können.

### Vorteile des LEGIO.pure

- **Steril filtriertes Wasser** – ideal für Hautreinigung & Babynahrung
- **Wichtige Mineralstoffe bleiben erhalten** – entfernt nur Bakterien und Schadstoffe wie z. Bsp. Mikroplastik
- **Sicherere Filtration** – umgeht Abkochgebote
- **Bewährte Technologie** – auch in medizinischen und städtischen Einrichtungen
- **Zeit- & kostensparend** – kein Kauf von Flaschenwasser nötig
- **Nachhaltig und umweltfreundlich** – weniger Plastikmüll & CO2
- **Einfache Montage** – Anschluss direkt an den Wasserhahn
- **Lange Nutzungsdauer** – bis zu 3 Monaten
- **Seriöse Zertifizierungen**



LEGIO.pure Startset



LEGIO.pure Wechselfilter

Infektionskontrolle

Waschtisch

## Medizinprodukt

### Technische Daten

| Artikelnummer             | 30.1.505   30.1.507   | 30.1.504   30.1.508   | 30.1.506  |
|---------------------------|---|---|---|
|                           |  |  |  |
| Typ                       | LEGIO.pure (Startset)   | LEGIO.mini (Wechselhülle)   | LEGIO.mini shower (Wechselfilter)   |
| Erhältlich in             | Aluminium   Schwarz   | Aluminium   Schwarz   |   |
| Max. Maße                 | Ø 5,7 cm x 7,4 cm   | Ø 5,7 cm x 7,4 cm   | Ø 5,5 cm x 7,2 cm   |
| Gewicht ca.               | 116 g   | 50 g  | 66 g  |
| Schnellkupplung           | M24 Außengewinde/M22 Innengewinde (Adapterring enthalten)                         | M24 Außengewinde oder mit M22 Innengewinde  | Stecknippel   |
| Volumenstrom bei 2 bar    |   |   | ca. 8 l/min   |
| Bestätigte Lebensdauer    | Abhängig von Handhabung   | Abhängig von Handhabung   | Bis zu 3 Monate   |
| Porengröße                |   |   | 0,15 µm   |
| Rückhaltung von Bakterien |   |   | LOG > 7   |

### Materialien und Anwendung

|                         |  |
|-------------------------|--|
| LEGIO.pure              | Aluminium. Leichte Spuren, Rillen oder Farbnuancen sind material- und fertigungsbedingt. Sie stellen keinen Mangel oder Qualitätsfehler dar und sind kein Reklamationsgrund. Wir empfehlen deshalb auch den Filter mit Handschuhen anzubringen.  |
| Filtergehäuse           | MBS (Methacrylat Butadien Styrol)  |
| Max. Betriebsdruck      | 5 bar  |
| Max. Betriebstemperatur | 60°C, 75°C für 30 Minuten während Nutzungsdauer  |
| Chloraufnahme           | gemäß TrinkWv  |
| Zertifizierung          | Medizinische Einstufung Klasse 1, Filtermaterialien sind gemäß KTW-BWGL zugelassen   |
| Lagerung & Handhabung   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trocken lagern; nach erstem Gebrauch vor Frost schützen</li> <li>• Mit Vorsicht behandeln; keinen starken Erschütterungen aussetzen</li> <li>• Desinfektion der Oberfläche mit allen gängigen medizinischen Oberflächenwischdesinfektionsmitteln</li> <li>• Kann nach Gebrauch über Restmüll entsorgt werden</li> </ul> |
| Filterwechsel           | Filtereinheit bei vermindertem Durchfluss, spätestens nach 3 Monaten wechseln, Fixierschraubchen mit Imbus lösen, Filter herausdrücken   |
| Empfehlung              | Bei thermischer Desinfektion den LEGIO.pure entfernen  |



Die Membraneinheit wurde von dem unabhängigen Labor Vitens hinsichtlich der Bakterien-Retention (ASTM F838) geprüft. Die Filtermaterialien wurden vom Hygiene Institut des Ruhrgebietes hinsichtlich der KTW-BWGL des Umweltbundesamtes getestet. Bei dem Wechselfilter des LEGIO.pure handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse I und entspricht den Vorgaben der Medizinprodukteverordnung MDR 2017/745. Alle Produkte und Bauteile von LEGIO unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Jedes Produkt wird einzeln auf seine Funktion und Wirksamkeit geprüft.

#### Haftungsausschluss:

Die in diesem Dokument angegebenen Informationen und Daten basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und werden als korrekt angesehen. Sie werden nach bestem Wissen angegeben und sollen eine Richtlinie für die Auswahl und Verwendung unserer Produkte bieten. Da die Bedingungen, unter denen unsere Produkte möglicherweise verwendet werden, außerhalb unserer Kontrolle liegen, bilden diese Informationen keine Garantie für die endgültige Leistung des Produktes und wir übernehmen keine Haftung hinsichtlich der Verwendung unserer Produkte. Die Qualität unserer Produkte ist gemäß unserer Verkaufsbedingungen gewährleistet. Bestehende (gewerbliche, intellektuelle oder andere) Schutzrechte müssen beachtet werden.



Produktion und Vertrieb durch LEGIO.tools GmbH  
Schlattgrabenstr. 10 • DE-72141 Walddorfaeslach • Deutschland  
T +49 (0) 7127 1806-0 • F +49 (0) 7127 1806-222  
E info@legio.com • www.legio.com

